



## TEST DRIVE TIPS

- 
 Identificeer patiënten vooraf aan het begin van de dag. Dit kan bijvoorbeeld bij:
  - Patiënten die op zoek zijn naar aanbevelingen om hun mondgezondheid te verbeteren
  - Patiënten die een elektrische tandenborstel van Oral-B willen uitproberen
  - Patiënten die een veranderingen in hun mondverzorgingsroutine nodig hebben
  - Patiënten met gingivitis of andere mondzorgproblemen
- 
 Laat de patiënt tijdens de poetsinstructie zelf een deel van de mond poetsen zodat ze zelf het verschil kunnen ervaren en u het poetsgedrag van patiënt beter kan begrijpen. Met TEST DRIVE kunt u patiënten leren hoe ze een elektrische tandenborstel van Oral-B op de juiste manier kunnen gebruiken.

## TEST DRIVE OPZET

- 
**Let op:** de Test-drive refills zijn voor eenmalig gebruik. Geef de refill niet mee aan de patiënt en gooi deze weg.
- 
 Zorg ervoor dat het handvat is opgeladen en in een beschermhoes heeft voordat de volgende patiënt komt
- 
 Bewaar de TEST DRIVE-refill verpakt en bij het handvat
- 
 Zorg dat het TEST DRIVE-handvat en de refill binnen handbereik zijn
- 
 Gebruik TEST DRIVE borstel loodrecht tegen het element
- 
 Volg de richtlijnen van de TEST-DRIVE om te desinfecteren

